


USO DEL AUTO TEST DE ANTÍGENOS

¿Para qué sirve?

El Auto Test de antígenos es una auto-prueba utilizada para la detección cualitativa del antígeno del SARS COV 2 en muestras nasales humanas, está diseñada para el uso del público en general.

ASÍ SE REALIZA LA PRUEBA


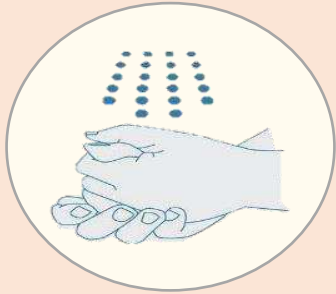


1. Lavarse las manos

Lávese o desinfectese las manos y asegúrese de que estén secas antes de iniciar la prueba.

2. Tomar el Hisopo


Abra el envoltorio extremo del bastoncillo. No toque la punta absorbente con las manos.

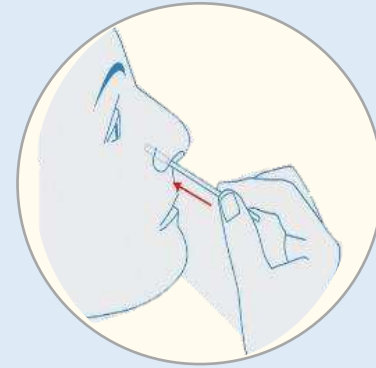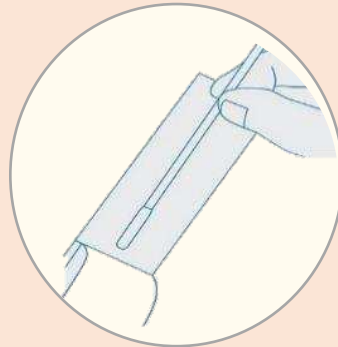

3. Recoja la muestra de la mucosa


Empuje el hisopo a menos de 2.5 cm. del borde de la fosa nasal.

Rote el hisopo 5 veces frotando las paredes nasales. Retire el hisopo y repita los pasos en la otra fosa nasal.

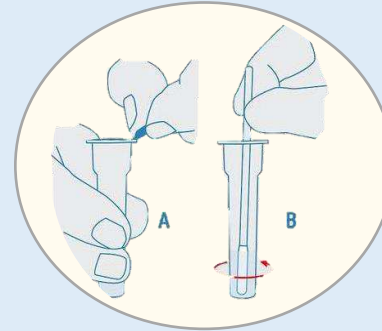


4. Inserte el hisopo

Retire la tapa y meta el hisopo con la muestra en el tubo. Agítelo 30 segundos.

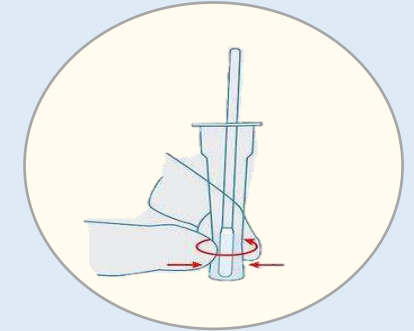


5. Gire el hisopo

Gire el Hisopo 5 veces mientras aprieta la parte inferior del tubo de extracción.

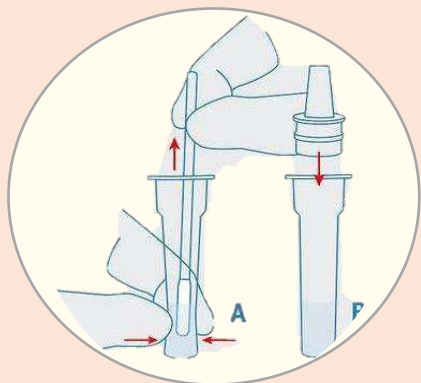


6. Retire el hisopo

Retire el hisopo mientras presiona el tubo. Acopie el tapón dispensador al tubo.

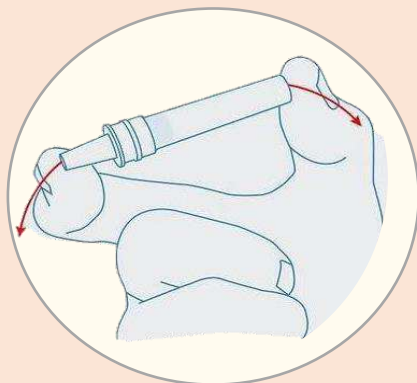

7. Agite el tubo


Agítelo o sacúdalo para mezclar bien el contenido del fondo del tubo.

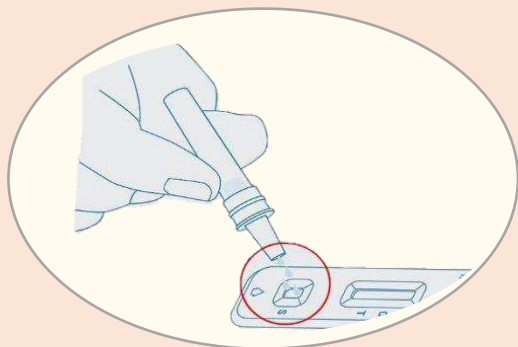

8. Coloque la muestra en la tarjeta de resultados

Apriete el tubo y administre 4 gotas de la solución en la ventana pequeña de la tarjeta de resultados. A los 25 o 30 minutos, lea el resultado.

CÓMO INTERPRETAR RESULTADOS

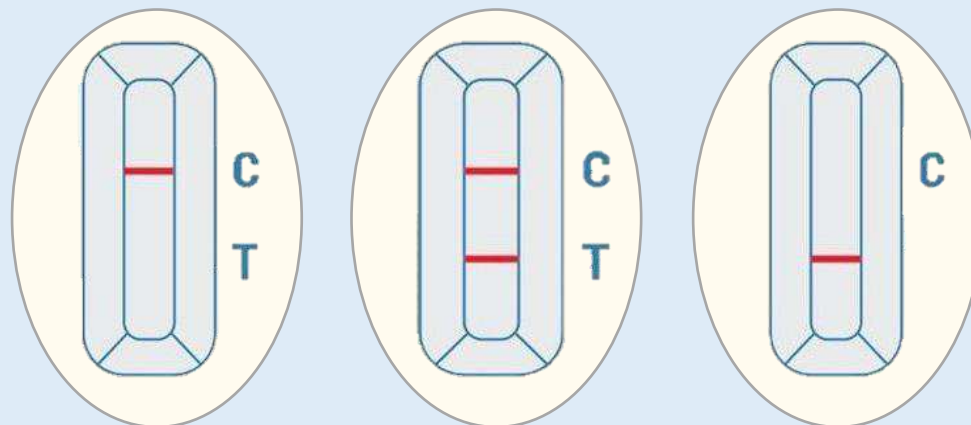

Negativo: Una línea de color visible en C, significa que no se detectó proteína viral en la muestra.

Positivo: Si tanto la línea de Color C, como la T son visibles, el resultado es positivo.

Inválido: Si no hay una línea visible o solo línea marcada en T, la prueba no es válida.